

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Contém 01 unidade

odonto
CASE
Seu Consultório Portátil



Prezado Cliente,

Parabéns pela excelente escolha na aquisição dos equipamentos portáteis ODONTOCASE, uma nova tecnologia em miniaturização revolucionando o conceito de atendimento odontológico.

Este manual é uma apresentação de seu equipamento com a descrição de detalhes importantes e cuidados a serem observados para sua melhor utilização.

Na ocorrência de qualquer problema com seu equipamento, que não possa ser solucionado com o auxílio deste manual, entre em contato com a revenda ODONTOCASE para obter todas as informações necessárias à assistência técnica.

Caso o atendimento recebido não tenha resolvido o problema ou deseje dar alguma sugestão com relação ao aprimoramento da qualidade de nossos produtos ou serviços, fale diretamente conosco:

Registro ANVISA: I80210180012

Registro Catálogo Ministério da Saúde: Classe 6520

Código voltagem 110- BR0411061/0009

Código voltagem 220- BR0411062/0010

ODONTOCASE

www.odontocase.com.br

E-mail: contato@odontocase.com.br

Telefone: 55 21 2490-6828

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA DE QUALIDADE

Você pode adquirir nossos produtos com toda a tranquilidade e a segurança que a marca ODONTOCASE pode garantir.

Ao comprar um produto ODONTOCASE, você está levando, a garantia ODONTOCASE de qualidade. Antes de chegar até você, nossos produtos passam pelos mais rigorosos testes, sendo avaliados em cada detalhe por nossos especialistas.

Garantia de qualidade e a tranquilidade de estar levando o melhor!

I. GARANTIA DOS PRODUTOS ODONTOCASE

A ODONTOCASE garante seus produtos contra defeitos de material, desde que mantido em condições normais de uso e manutenção.

A ODONTOCASE, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica autorizada pela ODONTOCASE, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida.

O reparo poderá incluir a substituição de peças por outras novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da ODONTOCASE.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A ODONTOCASE não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia. A garantia não cobre a instalação do equipamento nem danos decorrentes da instalação inadequada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

III. TENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso inadequado do produto pelo cliente, como superfícies de fibra de vidro e outras peças expostas externamente arranhadas trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de intervenção no produto realizada por terceiro não autorizado pela ODONTOCASE; (c) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (d) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto ODONTOCASE (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (e) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (f) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal; (g) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, mangueiras e conectores, etc; (h) Defeitos ou danos causados por oxidação de peças do produto causados por exposição inadequada do mesmo a líquidos de qualquer espécie.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Esta garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Período de Garantia por Produto

A política de garantia dos produtos ODONTOCASE é diferenciada para as diversas linhas de produtos, contados a partir da data da Nota Fiscal de Venda ao consumidor, conforme o quadro abaixo:

PRODUTO:

ODONTOCASE PREMIUM E BASIC LINE

GARANTIA (MESES) = 12 (sendo 90 dias de garantia legal e 9 meses de garantia contratual), o COMPRESSOR que acompanha o ODONTOCASE a garantia será diretamente pelo distribuidor do compressor.

COMPRESSOR

GARANTIA (MESES) = 12 (sendo 90 dias de garantia legal). Mais 9 meses de garantia dos **COMPRESSORES** comercializados que acompanham os equipamentos serão dadas diretamente pelo fabricante do compressor.

CADEIRA S.A

GARANTIA (MESES) = 3 (sendo 90 dias de garantia legal). Mais 9 meses de garantia do ATUADOR, ESTRUTURA e PLACA ELETRONICA comercializado que acompanha o equipamento será dada diretamente pelo fabricante.

CADEIRA S.B, MOCHO, CART

GARANTIA (MESES) = 3 (sendo 90 dias de garantia legal). Mais 6 meses de garantia do produto comercializado que acompanha o equipamento será dada diretamente pelo fabricante.

RAIOX

GARANTIA (MESES) = 12 (sendo 90 dias de garantia legal). Mais 9 meses de garantia do RAIOX será dada diretamente pelo fabricante.

LANTERNA

GARANTIA 90 dias de garantia legal do produto comercializado que acompanha o equipamento será dada diretamente pelo fabricante.

CERTIFICADO DE GARANTIA


Proprietário:

Nota Fiscal número:

Local e Data:


Revendedor:

Figura 01

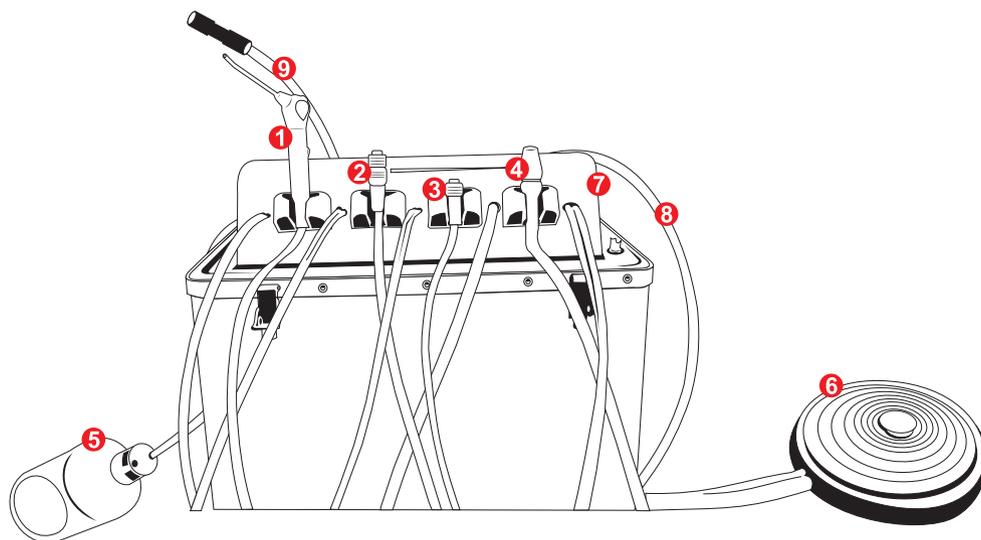

- ❶ Seringa Tríplice
- ❷ Terminal de encaixe alta rotação
- ❸ Terminal de encaixe micromotor
- ❹ Sugador
- ❺ Reservatório de água
- ❻ Pedal
- ❼ Equipamento odontológico portátil modular
- ❽ Esgoto
- ❾ Mangueira de conexão

Figura 02

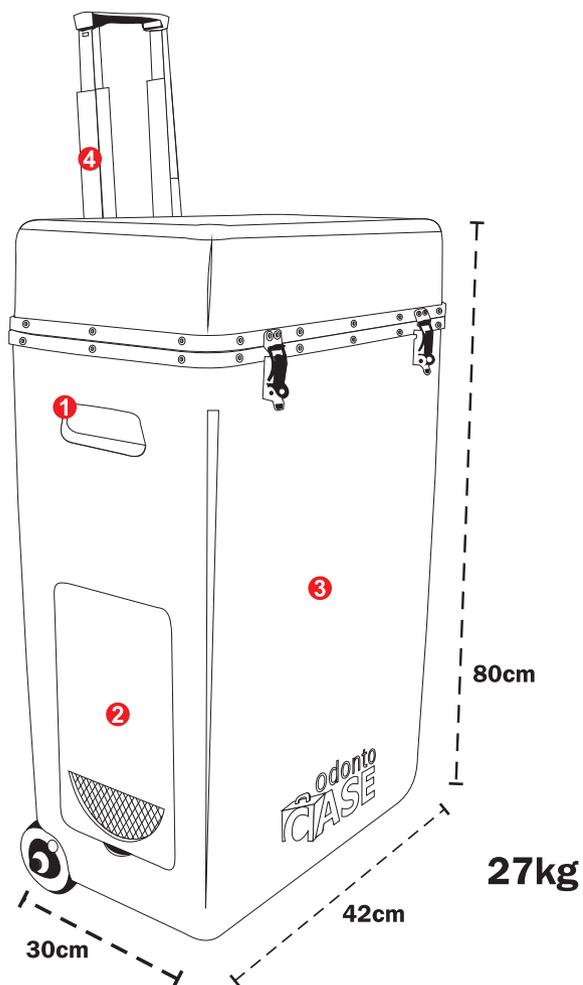


- ① Alças Laterais
- ② Porta de Ventilação e Cabo de Força
- ③ Case de fibra
- ④ Alça telescópica

www.odontocase.com.br


Passo **1**

Abra os fechos que unem a tampa com o equipamento

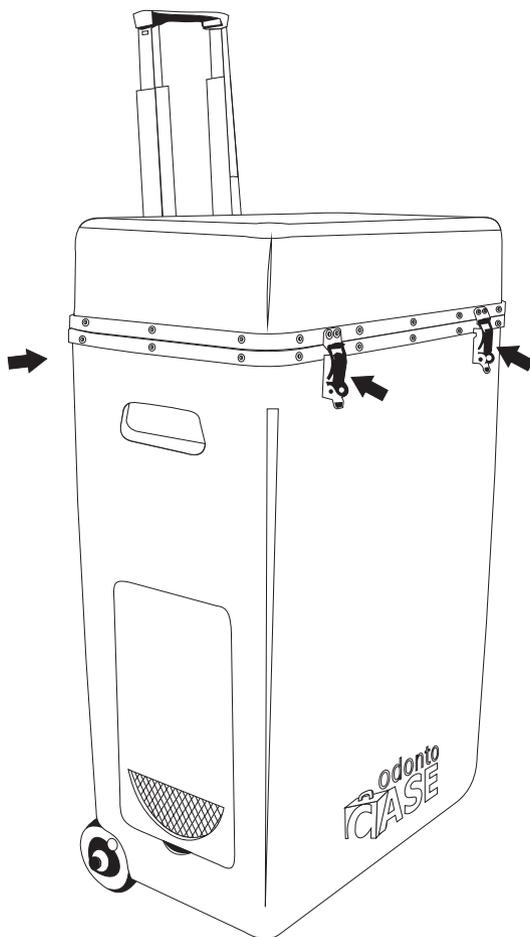

Passo 2

Após a retirada da tampa, posicione o equipo em uma superfície plana, de maneira a lhe ser mais ergonômico e para seu melhor manejo.


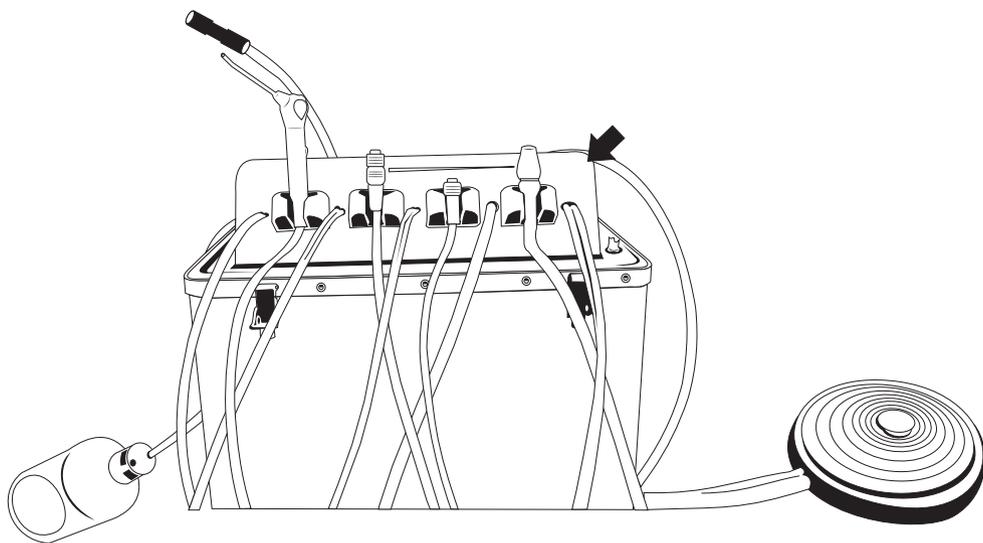


Passo 3

Evite deixar as mangueiras enroladas e vedadas


Passo **4**

Conecte a mangueira de 5 metros que veio com seu equipamento no engate rápido do equipo com o engate rápido do equipamento.

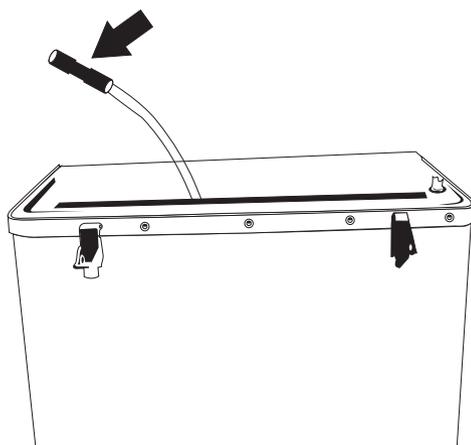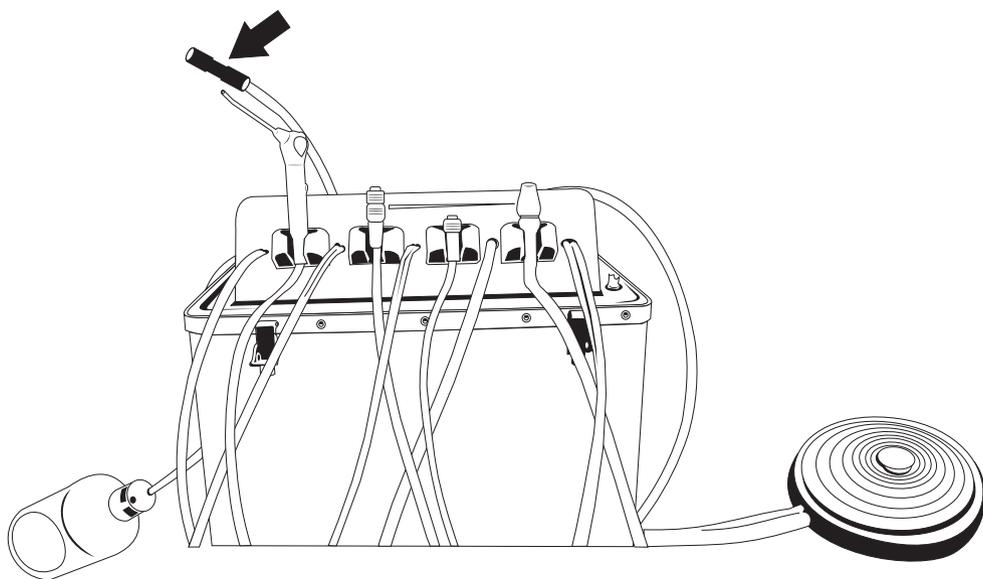

Passo 5


Preencha com água até a metade da garrafa pet e conecte com a sua tampa. Lembrando que e necessário que esteja bem fechado para sua boa utilização e com isso ter uma boa pressão e evitando vazamento.

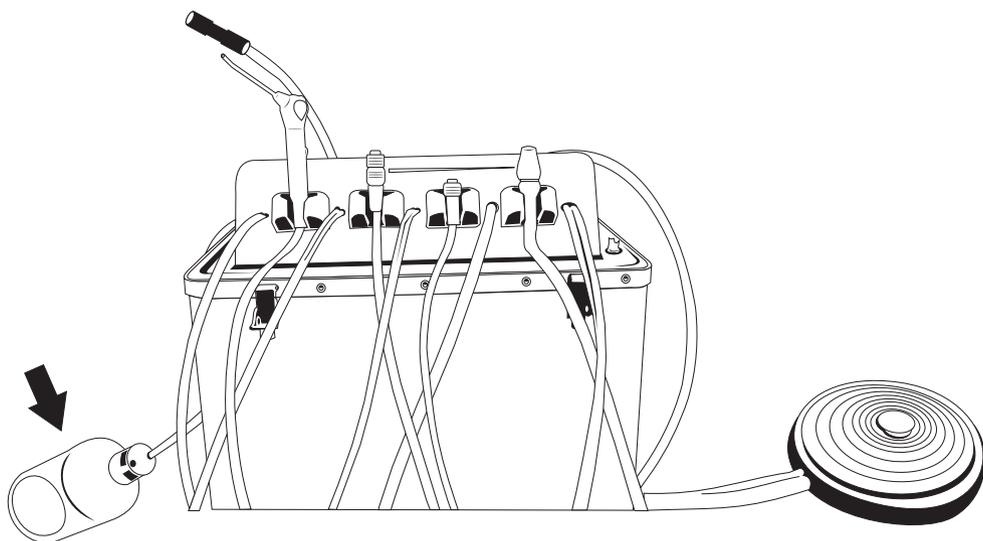

Obs: Não deixar a garrafa deitada ou pendurada pela mangueira

Passo **6**


Retire a porta de ventilação do lado esquerdo do equipamento.

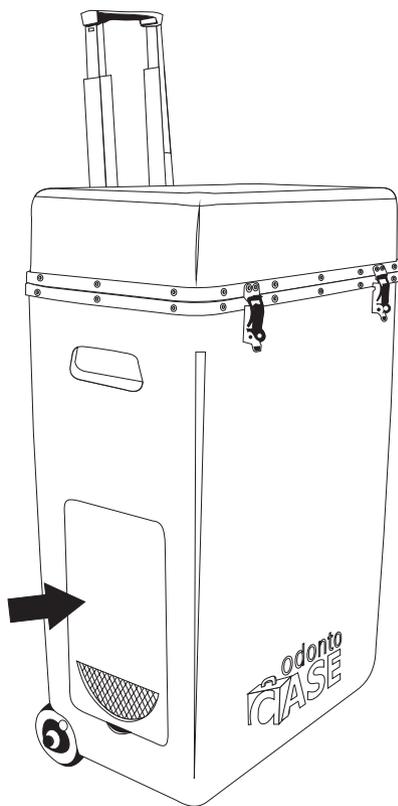

Puxe o cabo de força do compartimento e verifique a voltagem do mesmo antes de conectar na tomada.


Passo **7**

Ligue o equipamento no botão ligue/desligue.
Lembrando, nunca desligue direto da tomada.

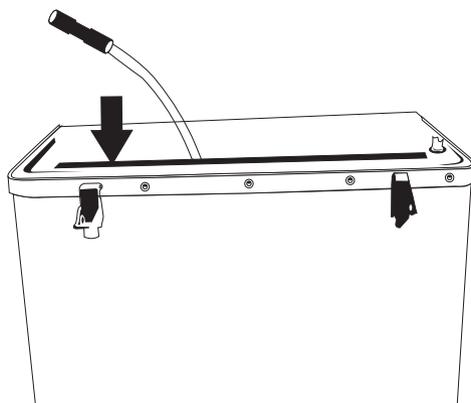

IMPORTANTE!

O regime de funcionamento do equipamento deverá respeitar um ciclo máximo de 15 minutos de operação contínua, para outros 15 minutos de parada, de modo que haja um resfriamento adequado.

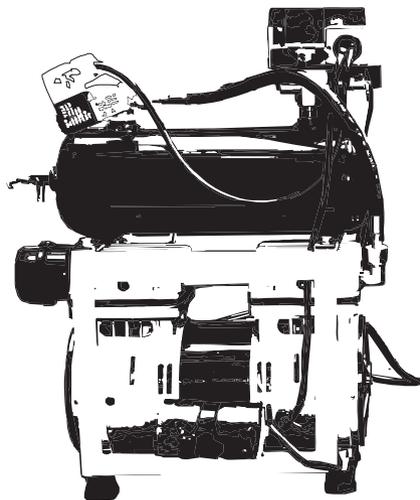

www.odontocase.com.br



Diagnóstico de defeitos a ações corretivas

Antes de efetuar qualquer serviço no equipamento, deve-se desconectá-lo da rede elétrica e esvaziar totalmente o reservatório de ar.

1. O equipamento não funciona:

- a. Não há energia elétrica. Verifique o disjuntor no quadro de força.
- b. Fio rompido, conexões elétricas soltas.
- c. Relê de partida defeituoso.
- d. Pressostato defeituoso.
- e. O protetor do motor cortou a alimentação elétrica devido ao superaquecimento. O motor irá ligar assim que a temperatura baixar ao normal.
- f. O compressor está com contrapressão na cabeça do pistão. Checar o funcionamento do pressostato. Verifique ainda a válvula de retenção e entre em contato.
- g. A pressão contida no interior do reservatório de ar é muito alta para que o compressor ligue. O pressostato somente liga o compressor se a pressão estiver abaixo da pressão de partida. Esvazie o reservatório.
- h. Capacitor defeituoso.

2. O compressor funciona mas a pressão não aumenta, ou aumenta muito lentamente:

- a. A válvula do filtro não foi devidamente aberta.
- b. O filtro de entrada está entupido. Entre em contato.
- c. Vazamentos nas conexões, mangueiras ou equipamento pneumático. Inspecione com espuma de sabão ou deixe o equipamento desligado por uma noite. A pressão não poderá cair mais que 1 bar.
- d. Válvula de retenção ou tubo de descarga obstruído. Limpe ou entre em contato.
- e. Válvulas do compressor com defeito.



Diagnóstico de defeitos e ações corretivas

3. Ruído anormal no compressor:

- a. Mola da suspensão quebrada. Comprove visualmente que o motor esteja nivelado e entre em contato.
- b. O tubo interno de descarga ou bloco está tocando na tampa. Desmonte a tampa do motor e ajuste o tubo de descarga.

4. O compressor aquece muito:

- a. Vazamentos nas conexões ou no equipamento pneumático. Veja o item 2c.
- b. Filtro de entrada obstruído pela sujeira. Veja item 2b.
- c. Temperatura ambiente muito alta. Nunca se deve instalar o equipamento em lugares abafados ou com pouca ventilação.
- d. O consumo de ar comprimido é superior à capacidade do compressor e o regime de 50% de funcionamento para outros 50% parado, não é respeitado. Contate a empresa OdontoCASE ou entre em contato.

5. O compressor liga mesmo não havendo consumo de ar:

- a. Fugas. Ver item 2c.

6. O compressor liga com mais frequência que o habitual:

- a. Há muito condensado no interior do reservatório de ar. Esvazie o reservatório por meio da válvula de dreno, abrindo lentamente (fig. 5 item 1).
- b. Vazamentos; veja o item 2c.

DADOS TÉCNICOS

O regime de funcionamento do equipamento deverá respeitar um ciclo máximo de 15 minutos de operação contínua, para outros 15 minutos de parada, de modo que haja em resfriamento adequado.

MODELO		SLF (302F)	
Voltagem	V	230	120
Frequência	Hz	60	60
Motor	HP	0,60	0,60
	KW	0,44	0,44
Deslocamento	l/min	138	138
	Pcm	4,87	4,87
Máxima Pressão	bar	8	8
	psi	120	120
Corrente Nominal A		6,6	4,1
Capacidade Do tanque	Litros	2	2
Peso	Kg	13	13
Dimensões C x L x A	Mm	312 x 139 x 238	
Nível de Ruído	dB (A)/1m	65	85

IMPORTANTE

- Reservamo-nos o direito de alterar estas especificações técnicas sem prévio aviso.
- Os manuais e garantia dos acessórios de compõem o OdontoCASE serão fornecidos pelos seus respectivos fabricantes.

Curta nossa página



facebook.com/odontocase



**Estrada da Barra da Tijuca, 1636 - Bloco A - Loja A4
Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
contato@odontocase.com.br**

Tel.: 55 21 2490-6828

www.odontocase.com.br